



ユニバーサルボーンクランプ

UNIVERSAL BONE CLAMP



ISO MEDICAL SYSTEMS

株式会社 **イソメディカルシステムズ**

特 長

骨を把持した状態でガイドピン、中空ドリル、キャニュレイテッドスクリューの挿入が可能です。スピードロック部にスケールが表示されており、ガイドピンゲージが不要です。



1-125-006-01
ユニバーサルボーンクランプ (UBC)



1-125-006-12
ガイドピンガイド



1-125-006-13
ドリルガイド

使用方法

1. 使用前の確認
キャニュレイテッドスクリューのシステムがユニバーサルボーンクランプ (UBC) に使用可能であることを確認します。
(ガイドピン外径1.6mm、中空ドリル外径3.0mm、スクリューヘッド外径6.0mm、ドライバーシャフト外径6.0mm以下であれば使用可能です)
2. ガイドピンの刺入
本体にドリルガイドおよびガイドピンガイドを装着し、骨を把持した状態でガイドピンを刺入します。
3. 中空ドリルのドリリング
ガイドピンガイドを本体からはずし、ガイドピンを残したまま、中空ドリルをドリリングします。
4. スクリューの長さの計測
スピードロック部のスケールで計測します。スケールの数値は把持部の両先端の距離を意味しますのでその数値からスクリューのタイプに応じて加減したスクリュー長を選択してください。
5. スクリューの挿入
本体からドリルガイドをはずし、選択したスクリューを挿入します。
6. ガイドピンの抜去
ガイドピンを抜去し、UBCを取りはずします。

使用上の注意

- ・本器は両先端の距離が50mmの場合にガイドピンが反対側に合う様に設計されておりますので、50mmよりも骨が大きい場合は上方に、小さい場合は下方にガイドピンが向かうことになります。
- ・骨把持部が骨に食い込んでいる場合、スピードロック部のスケールには、実際の骨の大きさよりも小さい数値が表示されます。
- ・ワッシャーを使用する場合は、本器具をはずしてからスクリューを挿入してください。

仕 様

品 番	商 品 名	規 格
1-125-006-01	ユニバーサルボーンクランプ (UBC)	
【構 成】		
1-125-006-11	UBC・本体	27.5cm
1-125-006-12	UBC・ガイドピンガイド	内径1.7mm 外径3.0mm
1-125-006-13	UBC・ドリルガイド	内径3.1mm 外径6.0mm



製造販売元 株式会社 **イソメディカルシステムズ**

〒277-0863 千葉県柏市豊四季495-14
TEL 04 (7141) 4021 FAX 04 (7141) 4022
品目届出番号：12B1X10016000030